

動脈血ガス (ABG) サンプルング

ラテックスフリー | 単回使用 | 使い捨て

動脈血ガス (ABG) サンプルングは、偶発的な針刺し損傷や血液媒介病原体への曝露を引き起こす可能性のある侵襲的手順です。Pulset™ ABG シリンジは、SafetyTip™ 針刺し保護機能を備えており、ケア環境での偶発的な針刺し損傷を防ぐのに役立ちます。SafetyTip™ は、針の安全な取り扱いに関する推奨事項を遵守するため、針の一体型部品として開発されました。Pulset™ には、医療で使用する際に最も簡単に手早く取り扱える ABG シリンジの 1 つに変えたその他の追加機能があります。



パンクチャーキット



A ラインキット



設計上特徴的な SafetyTip™ は、挿入部位の最適な視覚化を提供します。針の斜角を上に向けると、保護シースがシリンジバルレルに平行に沿うため、遮るものがない鮮明な視界が得られます。また、特許取得済みのデュアルロック設計は、カチッという音で針をしっかりカバーしていることを示して、安全性を高めています。

PULSET™ の利点

利器保護デバイス (SAFETYTIP™)

- SafetyTipは、準備完了 / 上向き位置に斜面がついた状態の針に取り付けられて納品されます
- SafetyTip デバイスは、挿入部位を最も見えやすくするため、シリンジに沿って折り曲げました
- 片手で使える状態にできます

通気孔付きプランジャ

- 空気泡を手動で除去することは不要に
- 針の挿入からラボへのサンプルの送付までの工程を削減

乾燥状態でバランスよく配合された亜鉛 / ヘパリンリチウム

- カルシウム電解質による測定誤差を除去
- 凝固を防ぎながら血液との混合が容易に

薄肉針の技術

- 標準的な針と同様にスムーズに採血
- 患者に痛みが少ない小穿刺部位

1cc Pulset シリンジ、ベント付き

製品	説明	アルコール含浸	ヨードフォア含浸	ガーゼ	氷バッグ	包帯	Q-CORK	患者ラベル	数量
3103-91*	安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH								100
3105-91*	安全チップ付き25g x 5/8インチ針、25u BH								100
3165-91	変更キット、安全チップ付き25g x 5/8インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3173-91	フルキット 25g x 5/8インチ針 23g x 1インチ滅菌針、25u BH	X	X	X	X	X	X	X	100

3cc Pulset シリンジ、ベント付き

製品	説明	アルコール含浸	ヨードフォア含浸	ガーゼ	氷バッグ	包帯	Q-CORK	患者ラベル	数量
3302-91*	安全チップ付き22g x 1インチ針、25u BH								100
3303-91*	安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH								100
3362-91	変更キット、安全チップ付き22g x 1インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3362-91S	変更キット、安全チップ付き22g x 1インチ針ルアースリップ、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3363-91	変更キット、安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3373-91	フルキット 安全チップ付き23g x 1インチ針、安全チップ付き22g x 1.5インチ滅菌針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100

コードガスケット

製品	説明	アルコール含浸	ヨードフォア含浸	ガーゼ	氷バッグ	包帯	Q-CORK	患者ラベル	数量
3182-91	コードガスケット、安全チップ付き針付き(2) 22g x 1インチシリンジ、25u BH				X			X (2)	100

ブラントチップカニューレ付き

製品	説明	数量
3100-30*	Aライン1ccシリンジ ブラントチップカニューレ25u BH	100
3300-30*	Aライン3ccシリンジ ブラントチップ、25u BH	100

*製品には CE マークが付いています

Aライン

製品	説明	数量
3100-20*	Aライン1cc シリンジ3cc廃棄用シリンジ25u BH	100
3100-25*	Aライン1cc シリンジ25u BH	100
3300-21*	Aライン3cc シリンジ5cc~6cc 廃棄用シリンジ25u BH	100
3300-25*	Aライン3cc シリンジ25u BH	100